

CERUSTOP® ušní olej

Zdravotnický prostředek

Co je CERUSTOP ušní olej?

CERUSTOP ušní olej se používá na odstraňování přebytečného nebo zatvrdlého ušního mazu (cerumenu), čímž se předchází zánětům zevního zvukovodu.

Jaké složky obsahuje CERUSTOP ušní olej?

Triglyceridy kyseliny kaprylové/kaprinové, parafinový olej, isostearyl isostearát, mandlový olej, PEG-40 proleát sorbitanu, butylhydroxyanisol/butylhydroxytoluen, vitamín E.

Jak CERUSTOP ušní olej funguje?

Zatvrdlý ušní maz zhoršuje sluch a může způsobit záněty v zevním zvukovodu. Proto je ho třeba pravidelně odstraňovat.

CERUSTOP ušní olej se kape do zevního zvukovodu, kde proniká do ušního mazu, jenž je díky tomu rozpustnější a tím i snadno odstranitelný.

CERUSTOP ušní olej je vhodný i pro uživatele naslouchadel.

CERUSTOP ušní olej lze také použít před výplachem ucha lékařem.

Oblasti použití – kdy byste měli použít CERUSTOP ušní olej?

- > Na rozpouštění a odstraňování přebytečného nebo zatvrdlého ušního mazu za účelem předcházení zánětům zevního zvukovodu.
- > Na čištění ušních boltců a zevního zvukovodu.

Používání během těhotenství a kojení neprovázejí žádné pochybnosti.

CERUSTOP ušní olej je určen pro použití dospělými osobami a dětmi od 3 let věku.

Dávkování a způsob aplikace – jak byste měli CERUSTOP ušní olej aplikovat?

Chcete-li odstranit přebytečný nebo zatvrdlý ušní maz, nakloňte hlavu mírně do strany a do zevního zvukovodu si při tom nakapejte přibližně polovinu objemu kapátka CERUSTOP ušního oleje majícího teplotu těla. Abyste zabránili vytékání ušního oleje, uzavřete ucho malým, volně vloženým chomáčkem vaty, který však nikdy nesmíte vtlačovat dovnitř zvukovodu. Po přibližně 10 minutách působení ucho jemně vypláchněte teplou vodou - ideálně ruční sprchou. V případě silného zatvrdnutí ušního mazu se doporučuje postup opakovat.

Pro dodatečné vyčištění ušního boltce nakapejte několik kapek CERUSTOP ušního oleje majícího teplotu těla na chomáček vaty a tímto několikrát vytřete ušní boltce tak, abyste z něj odstranili ulpělý ušní maz, nečistoty a šupinky kůže. Poté boltce otřete suchým hadříkem.

Po vypláchnutí vodou doporučujeme použít NORMISON ušní kapky za účelem rychlého vysušení a obnovení přirozeného ochranného kyselého pláště kůže zevního zvukovodu.

V jakých případech se nemá CERUSTOP ušní olej používat?

- > Jste-li přecitlivělí (alergií) na některou ze složek přípravku,
- > při zánětu zvukovodu a perforaci ušního bubínku (otvoru v ušním bubínku).

Možné vedlejší účinky/interakce

Do této doby nejsou známy žádné vedlejší účinky. Studie interakcí s jinými produkty nebyly provedeny.

Informace pro bezpečné použití

CERUSTOP ušní olej je zdravotnický prostředek. V případě bolesti uší nebo silného ucpaní zvukovodu mazovou zátkou musíte bezpodmínečně vyhledat lékařskou pomoc! V případě preexistence poškození ušního bubínku/středního ucha se před použitím přípravku CERUSTOP ušní olej poradte se svým lékařem.

Nezasouvejte do zvukovodu žádné cizí předměty (např. vatové tyčinky)!

Lahvičku vždy uchovávejte uzavřenou a mimo dosah dětí!

Velikost balení: lahvička o objemu 10 ml, včetně kapátka.

Trvanlivost: viz datum použitelnosti uvedené na obalu. Po prvním otevření lahvičky přípravek nepoužívejte déle než 8 týdnů.

Pokyny pro skladování:  Uchovávejte při teplotě 8 °C - 25 °C.  Vyžaduje ochranu proti světlu.

 Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vídeň, Rakousko

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Vídeň, Rakousko

Distributor v České republice: Agency MM Health s.r.o., U vily 463, 691 05 Zaječív



Stav informace: červenec 2021

 Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták!

 Šarže

 Spotřebujte před

CERUSTOP® ušný olej

Zdravotnícka pomôcka

Čo je CERUSTOP ušný olej?

CERUSTOP ušný olej sa používa na odstraňovanie prebytočného alebo zatvrdnutého ušného mazu (cerumenu), čím sa predchádza zápalom vonkajšieho zvukovodu.

Aké zložky obsahuje CERUSTOP ušný olej?

Triglyceridy kyseliny kaprylovej / kaprinovej, parafínový olej, isostearyl isostearát, mandľový olej, PEG-40 peroleát sorbitanu, butylovaný hydroxyanizol/butylovaný hydroxytoluén, vitamín E.

Ako CERUSTOP ušný olej funguje?

Zatvrdnutý ušný maz znižuje schopnosť počutia a môže byť príčinou zápalov vo vonkajšom zvukovode. Preto je potrebné ho pravidelne odstraňovať.

CERUSTOP ušný olej sa nakvapká do vonkajšieho zvukovodu, kde prenikne do ušného mazu, vďaka čomu je tento rozpustnejší, a teda sa ľahko odstraňuje.

CERUSTOP ušný olej je vhodný aj pre používateľov naúčvacích prístrojov.

CERUSTOP ušný olej sa môže použiť aj pred výplachom ucha lekárom.

Oblasti použitia – kedy by ste mali použiť CERUSTOP ušný olej?

- > Na rozpúšťanie a odstraňovanie prebytočného alebo zatvrdnutého ušného mazu, aby sa predchádzalo zápalom vonkajšieho zvukovodu.
- > Na čistenie ušnic a vonkajšieho zvukovodu.

Neexistujú žiadne pochybnosti týkajúce sa použitia počas tehotenstva a dojčenia.

CERUSTOP ušný olej je určený na použitie u dospelých a detí od 3 rokov.

Dávkovanie a spôsob aplikácie – ako by ste mali aplikovať CERUSTOP ušný olej?

Ak chcete odstrániť prebytočný alebo zatvrdnutý ušný maz, nakloňte hlavu mierne na stranu a do vonkajšieho zvukovodu si pri tom nakvapkajte približne polovicu objemu kvapkadla ušného oleja CERUSTOP, ktorý má teplotu tela. Aby ste zabránili vytekaniu ušného oleja, zapchajte si ucho malým chumáčikom vaty, pričom tento chumáčik do ucha len voľne vložte a nikdy ho nezatláčajte do vnútri zvukovodu. Po približne 10 minútach pôsobenia ucho jemne vypláchnite teplou vodou - ideálne ručnou sprchou. Ak je ušný maz silno zatvrdnutý, odporúča sa postup zopakovať.

Na dodatočné vyčistenie ušnice nakvapkajte niekoľko kvapiek CERUSTOP ušného oleja majúceho teplotu tela na chumáčik vaty a niekoľkokrát ním vytrite ušnicu tak, aby ste z nej odstránili ušný maz, nečistoty a šupinky kože. Potom utrite ušnicu suchou handričkou.

Po vypláchnutí vodou odporúčame použiť NORMISON ušné kvapky na rýchle vysušenie a obnovenie prirodzeného ochranného kyslého pláštka kože vonkajšieho zvukovodu.

Kedy sa nemá CERUSTOP ušný olej používať?

- > Ak ste precitlivení (alergickí) na niektorú zo zložiek prípravku,
- > pri zápale zvukovodu a perforácii ušného bubienka (otvore v ušnom bubienku).

Možné vedľajšie účinky/interakcie

Doteraz nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Štúdie o interakciách s inými produktmi neboli vykonané.

Informácie pre bezpečné používanie



Ušný olej CERUSTOP je zdravotnícka pomôcka. V prípade bolesti uší alebo ak je váš zvukovod silne upchatý mazovou zátkou, musíte bezpodmienečne vyhľadať lekársku pomoc! V prípade už existujúceho poškodenia bubienka/stredného ucha sa pred použitím CERUSTOP ušného oleja poraďte so svojim lekárom.

Do zvukovodu nezasúvajte žiadne cudzie telesá (napr. vatové tyčinky)!

Fľaštičku vždy uchovávajte uzavretú a mimo dosahu detí!

Veľkosť balenia: fľaštička o objeme 10 ml, vrátane kvapkadla.

Trvanlivosť: pozri dátum expirácie uvedený na obale. Nepoužívajte dlhšie ako 8 týždňov po prvom otvorení.

Pokyny na skladovanie:  Uchovávajte pri teplote 8 °C - 25 °C.  Chráňte pred svetlom.

 Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viedeň, Rakúsko

Distribútor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viedeň, Rakúsko

Distribútor v Slovenskej republike: Agency MM Health SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá



Stav informácií: júl 2021