

NORMISON ušní kapky

Zdravotnický prostředek

Co jsou NORMISON ušní kapky?

NORMISON ušní kapky slouží k preventivní a doprovodné terapii zánětů zevního zvukovodu, zvláště při častějším nebo delším pobytu ve vodě.

Co je obsaženo v NORMISONU ušních kapkách?

NORMISON ušní kapky obsahují izopropylalkohol, vodu, kyselinu octovou a dexpanthenol.

Jaké vlastnosti mají NORMISON ušní kapky?

Příliš vysoká vlhkost a příliš vysoká alkalická hodnota pH podporuje vznik zánětu zevního zvukovodu. Zvláště po intenzivním kontaktu s vodou je odstranění vlhkosti z ucha důležitým opatřením pro předcházení zánětům. Zvláštní složení NORMISONU ušních kapek zajišťuje, aby došlo k rychlému uschnutí kožních povrchů v zevním zvukovodu. Obsažené kyselé komponenty napomáhají rychlé obnově a udržení přirozeně kyselého ochranného povrchu kůže. Obsažený dexpanthenol poskytuje kůži ještě další zvláštní ochranu navíc.

Terapeutické indikace – na co se NORMISON ušní kapky používají?

- K prevenci zánětů zevního zvukovodu, zvláště při častějším anebo déle trvajícím pobytu ve vodě, např. po plavání, koupání, potápění, vodních sportech.
- Jako doprovodná terapie v rámci medikamentózního léčení zánětů zevního zvukovodu.

NORMISON ušní kapky mohou být užívány v těhotenství a při kojení.

NORMISON ušní kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 3 let.

Dávkování a způsob použití – jak se mají NORMISON ušní kapky používat?

Po pobytu ve vodě (sladké nebo slané) si nakapejte cca 5 kapek NORMISONU ušních kapek do zevního zvukovodu. Pak nechte tekutinu působit cca 20 - 30 sekund s hlavou nakloněnou ke straně.

Po narovnání hlavy otřete vytékající tekutinu a zbylou tekutinu, která zůstala ve zvukovodu, nechte vstřebat. Celý proces opakujte i ve druhém uchu.

NORMISON ušní kapky mají mít před použitím pokud možno tělesnou teplotu.

Při přítomnosti ušního mazu, kožních lupů anebo jiných usazených látek se doporučuje před použitím NORMISONU ušních kapek provést vyčištění zevního zvukovodu přípravkem CERUSTOP ušní olej.

Kdy se nesmí NORMISON - ušní kapky používat?

- Jste-li přecitlivělí (alergičtí) na některou látku obsaženou v přípravku.
- Při perforované bubíkové bláně (otvor v bubínku).

Zvláštní upozornění pro bezpečné používání:

NORMISON ušní kapky nejsou lék. Při ušních bolestech musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc! Zvukovod nesmíte nikdy mechanicky čistit anebo ucpávat vatou!

NORMISON ušní kapky mohou při lehkém podráždění zevního zvukovodu vyvolat pocit pálení.

NORMISON ušní kapky se nesmí užívat vnitřně, ani kapat do očí!

Lahvička musí být stále uzavřena a uchovávána mimo dosah dětí!

Velikost balení: 10 ml lahvička s kapací pipetou.

Doba použitelnosti: 36 měsíců. Po prvním otevření nepoužívat déle než 8 týdnů.

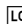
Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, A-1200 Vídeň, Rakousko

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Vídeň, Rakousko

Distributor v ČR: Agency MM Health s.r.o., Vinohrady 53, 639 00 Brno

Revize textu: Květen 2013

 Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták!

 Šarže

 Spotřebujte před